

PHILIPS

RESPIRONICS

DreamWear

Dulce despertar

DreamWear: La sensación de no llevar mascarilla*

Conector giratorio en la parte superior de la cabeza

para proporcionar al paciente libertad de movimiento

Mascarilla suave y flexible

Aporta un toque de suavidad a la cara del paciente

Pequeño	1116745
Mediano	1116746
Grande	1116747

Arnés ligero y fino

Arnés	1116750
-------	---------

Almohadilla nasal bajo la nariz

Evita la aparición de marcas rojas, molestias o irritación en las fosas nasales o el puente de la nariz**

Fundas de tela

Aportan suavidad a la interfaz en contacto con la mejilla del paciente

Fundas (x2) 1116754

Almohadilla bajo la nariz

Pequeño	1116740
Mediano	1116741
Grande	1116742
Mediano ancho	1116743

El Pack Mediano incluye la mascarilla Dreamwear tamaño mediano y los 4 tamaños de almohadilla (S, M, L, MW).

El Fit Pack incluye los 3 tamaños de la mascarilla Dreamwear (Pequeño, Mediano, Grande) y los 4 tamaños de almohadilla (S, M, L, MW).

Mascarilla con arnés	Internacional ⁽²⁾	Global ⁽¹⁾
Mediano	1116720	1116700
Fitpack	1116696	

*Cuestionario 2015 de Philips sobre preferencias del usuario; datos de archivo.

**La mascarilla no está en contacto directo con el puente de la nariz ni las fosas nasales.

Consejos útiles

Le ofrecemos algunos consejos para tener en cuenta cuando ajuste y use la mascarilla para sus pacientes.

Si desea obtener más información, visite nuestra guía de vídeo en **philips.com/saos**



- Lave a mano la mascarilla antes de usarla (consulte el apartado sobre cuidados de la mascarilla en las instrucciones de uso). Lávese la cara. No use hidratantes ni lociones en las manos o la cara.
- Hay cuatro tamaños de almohadilla (S, M, L, MW) disponibles. Póngase el medidor de tamaño de almohadilla debajo de la nariz para determinar su tamaño. Para obtener mejores resultados, use la almohadilla más pequeña que se ajuste a su nariz.
- El error más habitual que se comete en el proceso de ajuste es apretar demasiado el arnés. Está atento a cualquier signo de presión excesiva, como enrojecimiento, ulceraciones o abultamiento de la piel alrededor de los bordes de la mascarilla.

Instrucciones de ajuste



Utilice el medidor de tamaño, que se encuentra dentro de la bolsa, en posición horizontal debajo de la nariz y seleccione el tamaño de almohadilla en función del lugar donde el borde exterior de las fosas nasales y la punta de la nariz entren en contacto con el medidor.




Coloque el arnés sobre la parte posterior de la cabeza.




La apertura de la almohadilla quedará situada justo debajo de las fosas nasales. La almohadilla deberá ajustarse a la nariz, para evitar que se produzcan fugas.

(La nariz no debe quedar dentro de la apertura de la almohadilla en ningún momento. Si alguna parte de la almohadilla se solapa con la nariz, dicha almohadilla no está correctamente colocada.)

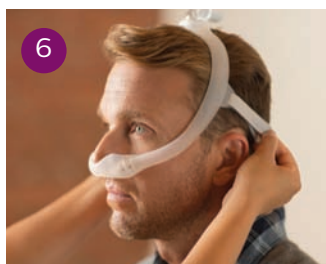

Para ajustar la almohadilla, separe las lengüetas del arnés de la tela. Ajuste la longitud de las tiras. Presiona las lengüetas hacia atrás sobre la tela para volver a conectarlas.

(Nota: El arnés no debe apretar demasiado.)

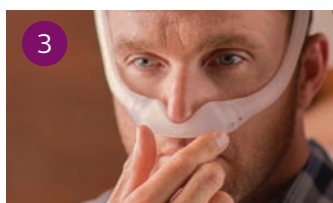

Con la mascarilla montada, coloque la almohadilla debajo la nariz.



Ajuste la mascarilla, hasta que se sienta cómodo. Cuando termine, el conector debe reposar encima de la cabeza.



Coloque la mascarilla sobre la cabeza.

Tamaños de mascarilla

La mascarilla de tamaño mediano (MED) se ajustará cómodamente a la mayor parte de los pacientes. Si este tamaño de mascarilla no se le ajusta a la cara, póngase en contacto con su profesional sanitario para comprobar si una estructura de mascarilla de tamaño pequeño (SM) o grande (LG) se adaptaría mejor a sus necesidades.

(1) Global: Alemán, español, francés, inglés, italiano, neerlandés, portugués brasileño.

(2) Internacional: Alemán, árabe, búlgaro, checo, croata, danés, eslovaco, esloveno, español, estonio, finés, francés, griego, hebreo, húngaro, inglés, italiano, kazajo, letón, lituano, macedonio, neerlandés, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, serbio, sueco, turco, ucraniano.

© 2016 Koninklijke Philips N.V. Reservados todos los derechos. Las especificaciones podrán modificarse sin previo aviso.

www.philips.com/respironics

Broudy CSP 11/7/16 PN462815

